

Nüüd saadaval!

PRESENTA® GEEL

NAHKA KAITSEV GEEL



- Rahustab nahaärritust stoomi ümbruses ja loob õige mikrokeskkonna loomulikuks taastumisprotsessiks.
- Niisutab nahka ja taastab õige elastsuse, vähendades pingetunnet.
- Geel loob nahale niisutava ja kaitsva barjääri tänu arvukatele niisutavatele ainetele.
- Toode sobib kasutamiseks ka selliste dermatoloogiliste sümptomite leevendamiseks nagu ekseem, psoriaas ja kseroos.
- Geeli võib kasutada diabeetikutel naha liigse kuivuse korral ja ennetavalt diabeetilise jala sümptomite puhul.



Levitaja: Linus Medical OÜ
Narva mnt 5, 10117 Tallinn
Tasuta infoliin: 800 3030
E-mail: abi@linusmedical.com



EE Lugege pakendil toodud juhend hoolikalt läbi, sest see sisaldab patsiendile olulist teavet toote stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® kasutamise kohta, ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kasutusjuhend PRESENTA®

stoomiümbruse nahka kaitsev geel
Meditsiinisead

50 ml



SM03

Spetsiaalne nahageel

Pakendil kasutatud sümbolid



1434



Tootja



Kõlblikusaeg



Seeria nr



Vt kasutus-
juhendit



Säilitus-
temperatuur



Mitte kasutada,
kui pakend on
kahjustatud



Vt kasutus-
juhendit

Kasutusjuhendi uuendamise kuupäev: Märtsil 2022. PGEL/IU/03/2022

1. Mis on stoomiümbruse nahka kaitsev geel PRESENTA®

Stoomiümbruse nahka kaitsev geel PRESENTA® on nahale niisutava kaitsekihiga moodustavate koostisainetega rikastatud geeli vormis meditsiinitoode. Toode on mõeldud stoomipatsientidele stoomiümbruse nahka kaitsmiseks ja stoomi ümbruse nahal esinevate ärritusnähtude leevendamiseks. Stoomipatsientidel kujutab see endast stoomikottide või -plaatide või/ja sooletalitlusega seoses tekkida võivate nahatüvisüsteuste profülaktika ühte osa.

Toodet võib kasutada ka selliste dermatoosinähtude leevendamiseks, nagu atoopiline dermatiit, ihtüoos ehk kalasoomustõbi, ekseem, psoriaas ja kseroos, samuti võivad seda kasutada suhkruhaiged liigse nahakuivuse korral ning profülaktiliselt diabeetilise jala sümptomite korral ja kiiritusravi (radioterapiat) saavad patsiendid.

2. Mis otstarbel kasutatakse stoomiümbruse nahka kaitvat geeli PRESENTA®

Stoomiümbruse nahk puutub kokku soolesisuga, mistõttu võib see ärritusele vastuvõtlikum olla. Stoomiseadmete, eriti stoomikoti hoidikute kasutamine on ärritust ja naha allergilisi reaktsioone põhjustada võivaks lisateguriks. Seetõttu on stoomiümbruse naha nõuetekohane ja süstemaatiline hooldus väga oluline. Geeli kasutamine vähendab naha pigust ja aitab seda niisutada. Stoomiümbruse nahk muutub elastsemaks, seeläbi ka ebasoodsate mõjurite toimele vastupidavamaks.

Stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® spetsiaalselt väljatöötatud koostis sisaldab mitmesuguseid niisutavaid aineid: arginiini, glütserooli, naatriumhüalurooni ja Omega Plus koostisaineid (viie õlisisaldusega koostisosa kompleks: oliiviõli, päevalilleõli, maisiõli, seesamiõli ja makadaamiapähkliõli). Lisaks kaitseb tootes sisalduv koostisosa SyrcalmTM (taimeekstrakte kompleks: Phragmites kharka ja Poria cocos) naha ülemäärase veekao eest ning tugevdab naha kaitsebarjääri. Tänu sellele on nahk elastsem, niisutatud ja välistegurite mõjule vähem vastuvõtlik, see vähendab omakorda naha sügelus- ja pigustustunnet.

Tänu nõuetekohasele niisutusele ja naha kaitsekihiga säilimisele säilib loomulike uuendusprotsesside toimumise soodustamiseks vajalik mikrokeskkond. Lisaks loob tootes sisalduv uuenduslik prebiootikum Bioliin P sobiva keskkonna füsioloogilise bakterifloora arenguks ja kaitseb patogeensete mikroorganismide arengu eest, kaitstes seeläbi patsiendi ärritatud nahka nakkuste eest.

3. Stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® annustamine ja manustamine

Stoomiümbruse nahka kaitvat geeli PRESENTA® tuleb kanda peale kasutusjuhendi kohaselt.

Stoomipatsiendid

Geeli kasutatakse tavaliselt stoomikoti vahetuse ajal. Veenduge, et nahk on pärast geeli kasutamist täiesti kuiv, vajaduse korral eemaldage liigne geel hügieenilise salvrätiga. Naha puhastamine ja kuivatamine võimaldab stoomiseadet õigesti kasutada.

Muud kasutusala

Patsiendid, kellel esineb atoopiline dermatiit, ihtüoos ehk

kalasoomustõbi, ekseem, psoriaas ja muud dermatoosid, võivad eriti atoopiliste nähtude süvenemise perioodil ja öösi, toodet mitu korda päevas kasutada.

Onkoloogiliste haigustega patsiendid peaksid kasutama toodet kiirgusega kokkupuutvatel nahapiirkondadel, eelkõige paar tundi pärast kiirgusega kokkupuudet ja öösi.

Tähelepanu! Mitte kasutada toodet vahetult enne kiiritamist. Geeli kasutamise ja kiiritamise vahele peab jääma mitmetunnine paus.

Jälgida patsiendi naha seisundit nii ravi käigus kui ka pärast selle lõppu. Mistahes murettekitavate ilmingute või nahamuutuste korral pöörduge viivitamatult eriarsti poole.

Mis tahes kahtluste korral pöörduge arsti poole.

Kasutamine

Kandke väike kogus geeli puhtale nahale. Hajutage õrnalt, järgides hügieenireegleid. Kasutage stoomiseadme vahetuse ajal.

4. Vastunäidustused

Ülitundlikkus (allergia) toote mistahes koostisosa suhtes.

Mitte kasutada lahtistel haavadel ega pärisnaha vigastamisel tekkinud nahamuutustel. Vältida silma sattumist.

5. Kuidas stoomiümbruse nahka kaitvat geeli PRESENTA® säilitada

Hoida originaalpakendis temperatuuril 5–25 °C.

Hoida lastele kättesaamatus ja nähtamatus kohas.

6. Toote stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® koostis

Põhikoostisosad: glütserool, PEG-40 hüdrogeenitud kastooriõli, SyrcalmTM (Phragmites kharka ja Poria cocos'e ekstraktid), prebiootikum Bioliin P, naatriumhüaluroon, Omega Plus õlikompleks (oliiviõli, päevalilleõli, maisiõli, seesamiõli, makadaamiapähkliõli), arginiin.

Abiained: vesi, karbomeer, hüdroksüütsetofenoon, 1,2-heksaandiool, kaprüülglükool, tokoferüülsetaat, naatriumbensoaat.

7. Pakendi kirjeldus

Stoomiümbruse nahka kaitsev geel PRESENTA® on pakendatud 50 ml pudelisse.

Üksikpakend sisaldab karpi, airless-tüüpi pudelit ja kasutusjuhendit.

Kaasaegne pakendivorm võimaldab toote lõpuni ära kasutada ja väldib toote saastumist.



Tootja:
Gofarm Sp. z o.o.
Górników street 21/26, 30-819
Kraków, Poland
www.gofarm.pl

Turustaja:
Linus Medical OÜ
Narva mnt. 5, Tallinn
10117, Eesti
Tasuta infoliini 800 3030